
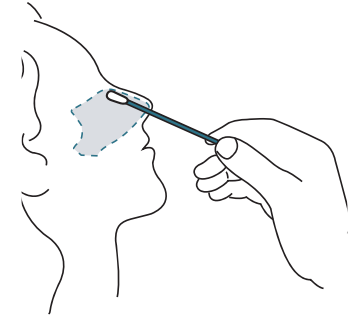
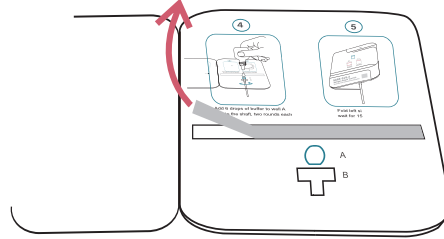


# Anleitung NASOCHECKcomfort

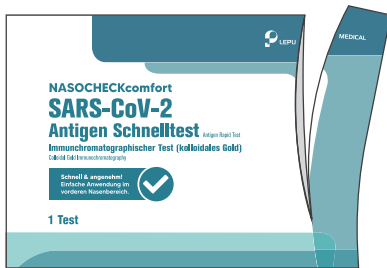

## Schritt 1:




- Die Testkarte muss **innerhalb 1 Stunde nach dem Öffnen** des versiegelten Beutels verwendet werden.
- Alle Teile des Testkits sollten Raumtemperatur haben

## Schritt 2:

- Testkarte aufklappen
- Testkarte auf eine feste, gerade Unterlage legen
- Folie über dem **Klebestreifen K** entfernen

## Schritt 3:

- Tupfer zuerst **2 – 3 cm** in die eine Nasenhöhle stecken
- Tupfer **5 Mal** im Kreis drehen
- Dann Vorgang **genauso in der zweiten Nasenhöhle wiederholen**

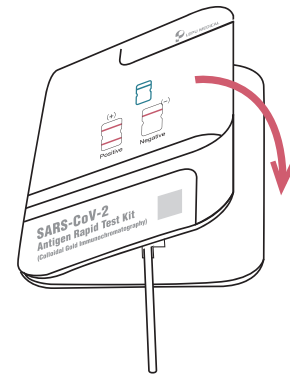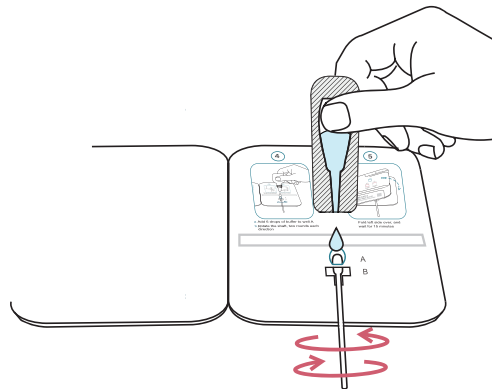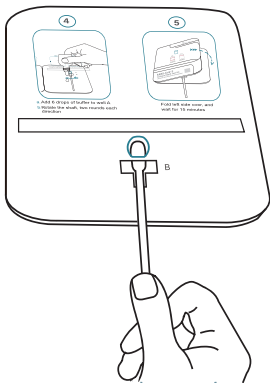

## Schritt 4:

- Tupfer am Stiel halten und den Tupferkopf von unten durch die **Öffnung B** in **Vertiefung A** schieben
- Den Tupferkopf dabei nicht berühren

## Schritt 5:

- Kopf von Lösungsfläschchen vorsichtig abdrehen und **6 Tropfen der Lösung** auf den Tupferkopf in Vertiefung **A** geben
- Danach Tupfer am Stiel **2 Mal in jede Richtung drehen**

## Schritt 6:

- **Karte schließen**, mit **Klebestreifen K** zusammenkleben & vorsichtig zusammendrücken.
- Ergebnis **nach 15 Minuten** (nicht später als 20 Minuten) auf der Vorderseite der geschlossenen Karte im **Ergebnis-Fenster** ablesen.
- Karte während der Wartezeit nicht mehr bewegen!

## Ablesen des Ergebnisses

<b>Positiv</b> (+)	<b>Negativ</b> (-)	<b>Fehlerhaft</b>	Bitte wiederholen Sie den Test mit einem neuen Test-Kit!